



L'installation du livre sur le pupitre n'est pas évidente mais avec un peu d'entraînement elle ne vous posera plus de difficulté. Par ailleurs, une fois installé vous profiterez de longues heures de lecture sans souci. Entre deux lectures, rangez simplement le pupitre au pied du lit après avoir légèrement replié les pieds. Vous pouvez également lire en le posant sur une table ou sur vos genoux si vous êtes installés dans un fauteuil.

A. Installation du livre

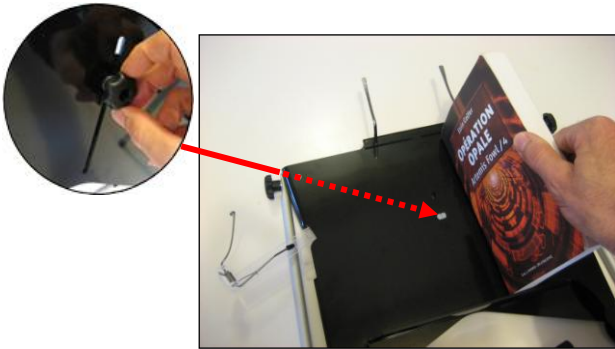

1. Desserrer la molette centrale à l'arrière et régler la hauteur du pupitre en présentant le livre qui doit reposer sur la régllette du bas et remonter juste sous les deux "Serre-livres".

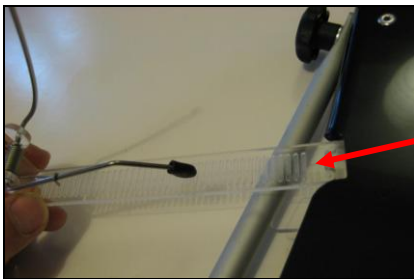



2. écarter les "Barres latérales crantées" en plexiglas jusqu'à leur dernier cran.




3. Ouvrir le livre à l'endroit où l'on souhaite démarrer la lecture et le présenter bien centré sous les deux Serre-livres. Du côté gauche, presser le Serre-livre qui doit écraser la partie la plus rebondie des pages, à quelques centimètres du centre.




4. Du côté droit, libérer une cinquantaine de pages avant de presser également le Serre-livre sur la partie droite.

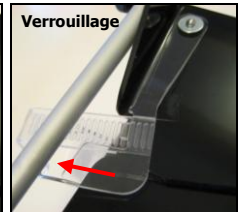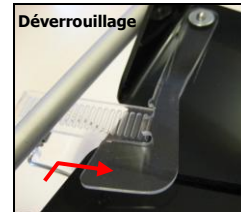


5. Libérer alors le verrouillage des Barres latérales crantées (deuxième pièce de plexiglas à l'arrière du pupitre) en exerçant une pression du doigt vers l'arrière puis sur le côté.

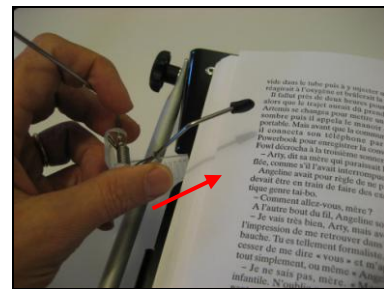

6. Tout en maintenant relevées les Tiges-ressort du maintien des pages, repousser à fond les Barres latérales crantées.

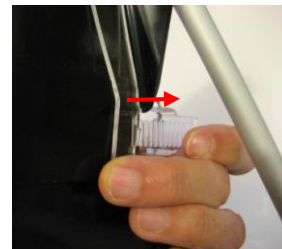

7. Reverrouiller alors les Barres latérales en ramenant du bout des doigts la pièce arrière vers le bord (jusqu'à entendre un "clac").

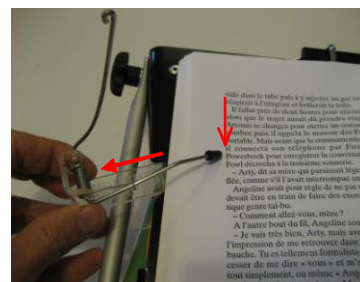

8. Affiner enfin le réglage des Barres latérales en les retirant cran par cran jusqu'à amener l'embout en caoutchouc de la Tige-ressort en bordure du texte.

Le pupitre est prêt. Il ne reste qu'à régler les pieds suivant la position de lecture souhaitée. (Voir au dos)

B. Positions de lecture



1. Lecture sur table

Pieds avants repliés, pieds télescopiques rentrés.



2. Position assise

Pieds avants repliés, pieds télescopiques sortis.




3. Position couchée

Pieds avants dépliés, pieds télescopiques sortis et orientés vers la tête du lit.



4. Position sur le côté


Pieds avants repliés, pieds télescopiques : l'un replié, l'autre sorti et tourné vers la tête (calé sous l'oreiller).

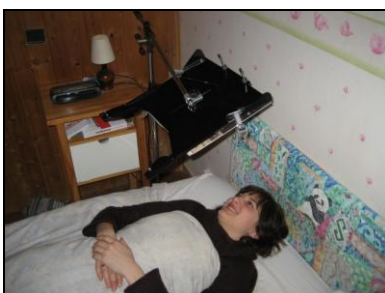


5. Position inversée

Une attache métallique et un pied perche (fournis en option), permettent de fixer le pupitre au-dessus du lit dans le cas où le lecteur est immobilisé à plat dos.


C. Changement de pages

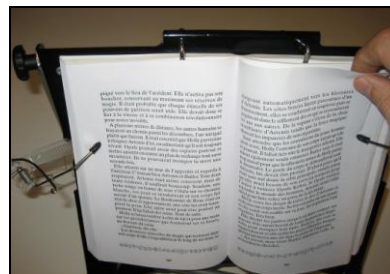

1. Attraper la page de préférence par le haut. La faire glisser vers le haut et la gauche pour la dégager de l'embout en caoutchouc.

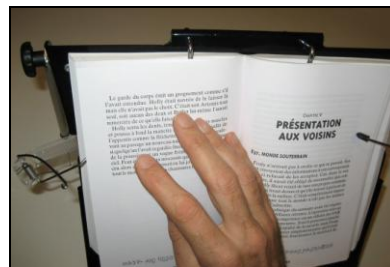


2. Tourner la page et la plaquer par-dessus l'embout en caoutchouc de gauche.

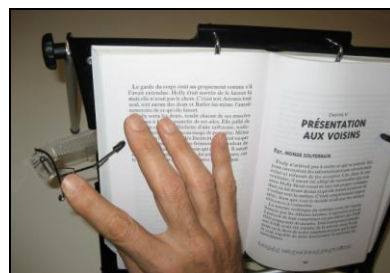

3. Poursuivre le mouvement de la main vers la gauche en accrochant du doigt la Tige-ressort pour refaire passer l'embout en caoutchouc par-dessus la page. Relâcher.

D. Précautions d'emploi

1. Manipulation des pieds télescopiques

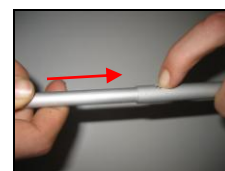

Pour allonger les pieds, tirer sur l'embout noir jusqu'à entendre le clic de la bille en veillant à rester dans l'axe et à ne pas forcer en rotation. Pour les rentrer, appuyer du bout du doigt sur la bille tout en renfonçant l'extrémité (toujours bien dans l'axe).

2. Conseils de rangement



Inutile de tout replier après lecture. Rabattre simplement les manettes en fil de fer sur le livre puis les 4 pieds dans le plan du plateau et poser le tout à l'envers contre la table de nuit.



Pour tout problème d'utilisation ou de garantie, contacter :
Christophe Leenhardt - Tél. 04 79 36 72 18 – christophe@systemgo.fr